



HOT Top™2

Линейка распылителей с высокой производительностью для сокращения времени процедуры ингаляции



Кислородная и аэрозольная терапия ▪ Терапия с распылением ингаляционных растворов



Распылитель HOT Top™2

Распылитель (ингалятор, небулайзер) HOT Top2 представляет собой конструкцию распылителя “нового” типа. В головной части распылителя выполнены порты смешения аэрозоля с воздухом из внешней среды. Это позволяет получить более высокую скорость потока и, как следствие, возможность увеличения объема аэрозоля, подаваемого пациенту.

Распылитель HOT Top2 обладает улучшенными характеристиками:

Распылитель HOT Top2 предназначен для доставки лекарственных препаратов в трахеобронхиальное дерево. При оптимальной скорости потока 8 л/мин, 80% выходного объема будут составлять частицы диаметром менее 5 микрон со средним массовым диаметром 3 микрон

Сокращенное время процедуры ингаляции

Увеличение объема

Основание со шкалой

Точная и более быстрая заправка

Малый остаточный объем

Снижает расход препарата

Reference: 1. Koncevicute. J. 98881 17.07.12

При скорости потока “транспортного” газа 6 л/мин производительность HOT Top2 будет аналогична “закрытому” ингалятору типа (Cirrus2), что делает пригодным использование HOT Top2 с маломощными (бытовыми) компрессорами.

Комплекты HOT Top2 с масками EcoLite™ относятся к группе изделий с минимальным воздействием на окружающую среду - на 28% снижается количественная оценка затрат, связанных с мероприятиями по безопасному использованию комплектов с масками EcoLite™ по сравнению с комплектами с обычными (ПВХ) масками.

Стандартное соединение “22F конус”

Подходит для аэрозольных масок, T-образных соединителей и мундштуков

Быстроразъемное соединение

Быстрая заправка



Безопасное соединение

Основание Sure-Loc™ - “резьба”, конусный хвостовик 6мм

Соединение Sure-Loc™ более надежное - исключается отделение трубки (типа 1178000) от распылителя и/или расходомера. Распылители HOT Top2 также доступны с основанием Sure-Loc, при использовании с трубкой и адаптером Intersurgical Sure-Loc эта система обеспечивает надежное соединение, предотвращая случайное отсоединение трубки от распылителя и расходомера. Кислородная трубка накручивается на основание распылителя, а другой конец подсоединен к расходомеру с адаптером. Трубку Sure-Loc можно также использовать со стандартным основанием распылителя, а распылители Sure-Loc также будут совместимы со стандартными трубками.



Нажмите и поверните для закрытия



Комплект: распылитель NOT Top2 для взрослых с маской

Аэрозольная маска Intersurgical EcoLite является частью глобальной программы Eco.

Продукция из линейки Intersurgical Eco не содержит ПВХ, тем самым снижая воздействие на окружающую среду. Больше комфорта для пациента – маска легкая. Используя передовые технологии, мы совместили два материала: из первого изготавливается прозрачный жесткий корпус маски, обеспечивая легкость и хорошую видимость; второй, термопластичный материал образует максимально удобную манжету, обеспечивает герметичность прилегания, идеально подходит для разной анатомии лица.



Гребень - изогнутая форма носовой части маски

предотвращает попадание струи кислорода в глаза пациента при частичной разгерметизации

Нет металлической клипсы

Совместима с МРТ

Эластичная манжета

Исключительный комфорт для пациента

Эластомерный держатель

обеспечивает фиксацию маски в положении "под" и "над" ушами. Положение держателя "под" ушами исключает травмирование кожи.

Положение "под" и "над"

Возможность выбора фиксации маски



Видео доступно на www.intersurgical.com





Информация о продукте и аксессуары

Снижено влияние на окружающую среду

Цель Интерседжикал - снизить вредное воздействие своих продуктов на окружающую среду. Использование новых технологий при производстве привело к удалению ПВХ из корпуса масок, тем самым снизив влияние на окружающую среду.



www.intersurgical.com/info/eco



Распылители HOT Top™2 – Стандартное основание

Код	Описание	Длина трубки	Кол-во/уп.
1472015	Небулайзер HOT Top2		65
1463015	Комплект: небулайзер HOT Top2 для взрослых с маской Intersurgical EcoLite™ и шлангом	1.8м	30
1468015	Комплект: небулайзер HOT Top2 для детей с маской Intersurgical EcoLite и шлангом	1.8м	36
1478015	Комплект: небулайзер HOT Top2 с мундштуком и шлангом	1.8м	45

Распылители HOT Top2 – Основание Sure-Loc™

Код	Описание	Длина трубки	Кол-во/уп.
1473015	Комплект: небулайзер HOT Top2 для взрослых с маской Intersurgical EcoLite™, основанием Sure-Loc и шлангом	1.8м	30
1474015	Комплект: небулайзер HOT Top2 для детей Intersurgical EcoLite основанием Sure-Loc и шлангом	1.8м	36
1475015	Комплект: небулайзер HOT Top2 с мундштуком и шлангом, с основанием Sure-Loc	1.8м	45
1471015	Небулайзер HOT Top2 с основанием Sure-Loc		75

Сделать запрос

Продукция с минимальным воздействием на окружающую среду



ЗАО «Интерседжикал», 115114 Россия, Москва, Дербеневская наб., 11, корп. В офис 904
T: +7 (495) 771 6809 F: +7 (495) 771 6809 info@intersurgical.ru www.intersurgical.ru



The manufacturer Intersurgical Ltd is certified to ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 and ISO 14001:2004

Please think before you print
Save energy and paper.
If you must print this information sheet please print it double sided.

IS10.28 RU • Issue 10.10.17