



Маски VariFit™ и FaceFit™ для НИВ (неинвазивной вентиляции легких), совместимые с соответствующими дыхательными системами и фильтрами



Реанимация • Интерфейсы пациента



Вентилируемые маски НИВ с клапаном безопасности

Вентилируемые маски имеют встроенные порты утечки для удаления выдыхаемого CO_2 . Вентилируемые маски также могут называться масками с портами или масками с портами утечки CO_2 . Эти маски имеют клапан безопасности, который открывается в случае непредвиденных ситуаций при вентиляции или при расстыковке дыхательной системы, позволяя тем самым пациенту дышать спонтанно (из атмосферы).

Маски, показанные на этой странице, имеют клапан безопасности. Эти маски могут быть использованы с однолинейными дыхательными системами без встроенного порта мониторинга CO_2 .

Примеры дыхательных систем Intersurgical, совместимых с таким типом масок, приведены на противоположной странице с аксессуарами для фильтров, которые могут быть необходимы

Вентилируемая маска для НИВ VariFit с клапаном безопасности

Для использования с однолинейной дыхательной системой без порта утечки CO_2

Сделать запрос

Видео доступно на www.intersurgical.com

Прозрачный коннектор



| Код | Описание | Коннектор с цветовой | Кол-во/уп. |
|---------|---|-----------------------|------------|
| 2260000 | маска VariFit для НИВ с клапаном безопасности, малая взрослая | <input type="radio"/> | 8 |
| 2261000 | маска VariFit для НИВ с клапаном безопасности, средняя взрослая | <input type="radio"/> | 8 |
| 2262000 | маска VariFit для НИВ с клапаном безопасности, большая взрослая | <input type="radio"/> | 8 |
| 2277000 | маска VariFit для НИВ с клапаном безопасности, очень большая взрослая | <input type="radio"/> | 8 |

Маска FaceFit для НИВ - с клапаном безопасности и портом утечки CO_2

Для использования с однолинейной системой без порта утечки CO_2

Сделать запрос


Видео доступно на www.intersurgical.com



| Код | Описание | Кол-во/уп. |
|---------|---|------------|
| 2250000 | маска FaceFit для НИВ, с портом, малая взрослая | 12 |
| 2251000 | маска FaceFit для НИВ, с портом, средняя взрослая | 12 |
| 2252000 | маска FaceFit для НИВ, с портом, большая взрослая | 12 |




Дыхательные системы без порта утечки CO₂ Однолинейные дыхательные системы без линии мониторинга давления

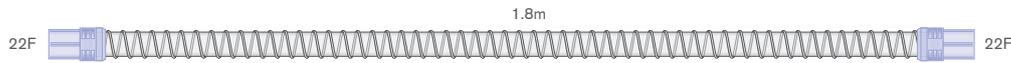

Система показана на рисунке


| Код | Описание | Длина | Кол-во/уп. |
|--------------|---|-------|------------|
| 5018000 (S*) | Гладкоствольный шланг 22мм с эластичными коннекторами, 22F-22F 1.8м | 1.8м | 20 (25*) |
| 5218000 | Гладкоствольный шланг Есо 22мм с эластичными коннекторами, 22F-22F 1.8м | 1.8м | 20 |
| 5020000 (S*) | Гладкоствольный шланг 22мм с эластичными коннекторами, 22F-22F 2.0м | 2.0м | 20 (20*) |

Сделать запрос

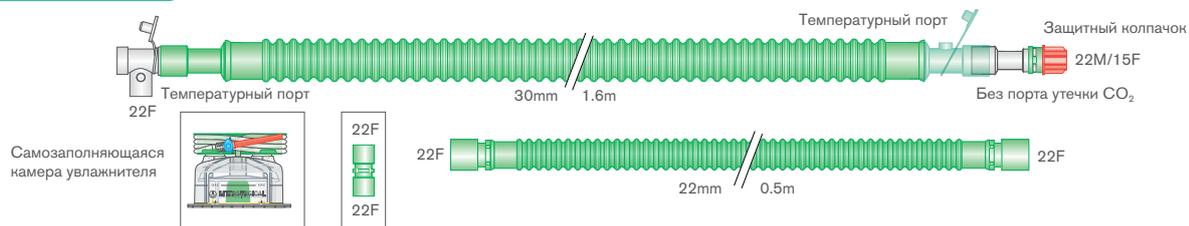

| Код | Описание | Кол-во/уп. |
|---------|---|------------|
| 2335000 | Дыхательный контур Flextube 30мм, bilevel, для взрослых, с проводом нагрева, с шарнирным соединителем, самозаполняющейся камерой увлажнителя и дополнительным шлангом 0,5м, длина 1,6 м | 6 |

Однолинейные дыхательные системы с линией мониторинга давления

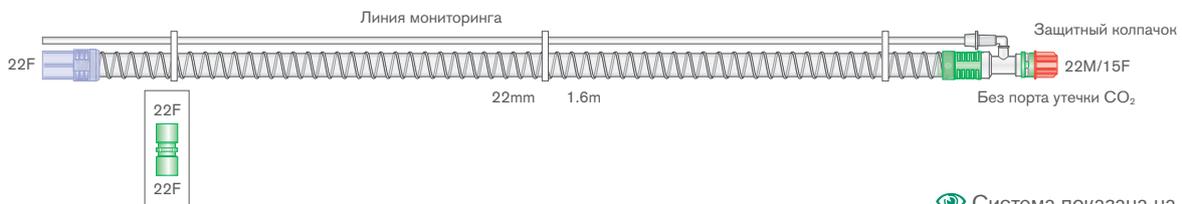

Система показана на рисунке

| Код | Описание | Кол-во/уп. |
|---------|--|------------|
| 5825000 | 2 Дыхательный контур Smoothbore bilevel 22мм для детей/взрослых с шарнирным соединителем, линией мониторинга, длина 1.6м | 25 |
| 2331000 | Дыхательный контур для взрослых bilevel с проводом нагрева Flextube 30 мм с шарнирным соединителем, линией мониторинга, самозаполняющейся камерой увлажнителя и дополнительным шлангом 0,5м, длина | 6 |

Сделать запрос



5361000



1690000

Варианты моделей с фильтром

| Код | Описание | Кол-во/уп. |
|---------|--|------------|
| 5361000 | Комплект: встроенный фильтр для дыхательных контуров bilevel | 60 |
| 1690000 | Дыхательный фильтр Flo-Guard | 50 |

Сделать запрос

Доступна стерильная опция Продукт со сниженным воздействием на окружающую среду

(S*) Добавьте "S" к семизначному коду, и вы получите стерильную версию продукта. например 5000000S (в скобках указано кол-во в стерильной упаковке)



Невентилируемые маски для НИВ с клапаном безопасности.

Невентилируемые маски для НИВ с клапаном безопасности, не имеют встроенных портов утечки и могут быть использованы с однолинейной дыхательной системой, у которых имеется порт утечки CO₂. Порт утечки CO₂ способствует удалению углекислого газа во время фазы выдоха.

Эти маски имеют клапан безопасности, который открывается в случае непредвиденных ситуаций при вентиляции или расстыковки дыхательной системы, способствуя тем самым спонтанному дыханию пациента из атмосферы.

Примеры дыхательных систем Intersurgical, совместимых с таким типом масок, приведены на противоположной странице с аксессуарами для фильтров, которые могут быть необходимы

Невентилируемая маска для НИВ VariFit с клапаном безопасности

Для использования с однолинейной дыхательной системой с портом утечки CO₂

🎥 Видео доступно на www.intersurgical.com

Прозрачный
голубой
коннектор




| Код | Описание | кодировкой | Кол-во/уп. |
|------------|---|------------|------------|
| 👁️ 2263000 | невентилируемая маска VariFit для НИВ с клапаном безопасности, малая взрослая | | 8 |
| 2264000 | невентилируемая маска VariFit для НИВ с клапаном безопасности, средняя взрослая | | 8 |
| 2269000 | невентилируемая маска VariFit для НИВ с клапаном безопасности, большая взрослая | | 8 |
| 2278000 | невентилируемая маска VariFit для НИВ с клапаном безопасности, очень большая взрослая | | 8 |

Сделать запрос



Дыхательные системы с портом утечки CO₂ Однолинейные дыхательные системы без линии мониторинга давления

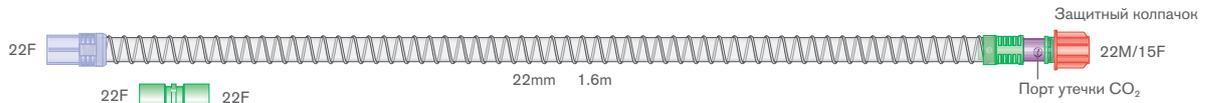


Система показана на рисунке

| Код | Описание | Кол-во/уп. |
|---------|---|------------|
| 5804000 | Дыхательная система Smoothbore Bilevel 22мм для взрослых/детей, с шарнирным соединителем со стороны пациента и портом утечки CO ₂ , 1,8м. | 30 |
| 5804011 | Дыхательная система Smoothbore Bilevel 22мм для взрослых/детей, с шарнирным соединителем со стороны пациента, портом утечки CO ₂ , и дыхательным фильтром на 7 дней, 1,8м | 30 |
| 2334000 | Дыхательная система для взрослых bilevel с проводом нагрева Flextube 30 мм с шарнирным соединителем, портом утечки CO ₂ , самозаполняющейся камерой увлажнителя и дополнительным шлангом 0,5м, длина 1,6м. | 6 |
| 2334001 | Дыхательная система для взрослых bilevel с проводом нагрева Flextube 30 мм с шарнирным шлангом 0,5м, с дыхательным фильтром на 7 дней, длина 1,6м. | 7 |

Сделать запрос

Однолинейные дыхательные системы с линией мониторинга

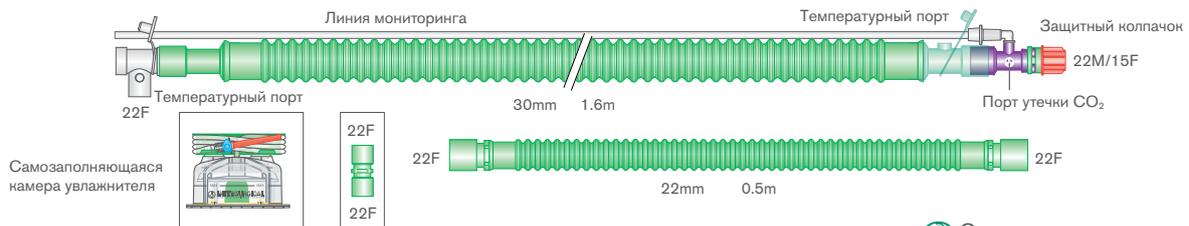

Система показана на рисунке

| Код | Описание | Кол-во/уп. |
|---------|---|------------|
| 5805000 | Дыхательный контур для взрослых и детей bilevel Smoothbore 22мм с шарнирным соединителем, портом утечки CO ₂ и линией мониторинга, длина 1,6м | 25 |
| 2031000 | Дыхательный контур для взрослых Flextube 30мм bilevel с проводом нагрева, с шарнирным соединителем, портом утечки CO ₂ , линией мониторинга, самозаполняющейся камерой увлажнителя и дополнительным шлангом 0,5м, длина 1,6м | 6 |

Сделать запрос



Варианты моделей с фильтром

| Код | Описание | Кол-во/уп. |
|---------|--|------------|
| 5361000 | Комплект: встроенный фильтр для дыхательных контуров bilevel | 60 |
| 1690000 | Дыхательный фильтр Flo-Guard | 50 |

Сделать запрос

Доступна стерильная опция

(S*) Добавьте "S" к семизначному коду, и вы получите стерильную версию продукта. например 5000000S (в скобках указано кол-во в стерильной упаковке)



Невентилируемые маски для НИВ

Невентилируемые маски для НИВ не имеют встроенных портов утечки и не имеют клапана безопасности. Эти маски могут быть использованы с двухшланговыми дыхательными системами.

Примеры дыхательных систем Intersurgical, совместимых с таким типом масок, приведены на противоположной странице.

Невентилируемая маска для НИВ VariFit

📺 Видео доступно на www.intersurgical.com

Голубой коннектор ●



| Код | Описание | кодировкой | Кол-во/уп. |
|-----------|---|--|------------|
| 👁 2265000 | Невентилируемая маска для НИВ VariFit, малая взрослая | ● | 8 |
| 2266000 | Невентилируемая маска для НИВ VariFit, средняя взрослая | ● | 8 |
| 2267000 | Невентилируемая маска для НИВ VariFit, большая взрослая | ● | 8 |
| 2279000 | Невентилируемая маска для НИВ VariFit, очень большая взрослая | ● | 8 |

Сделать запрос

Маска для НИВ FaceFit - без клапана безопасности и без порта утечки CO₂

Для использования с двухшланговыми дыхательными системами

📺 Видео доступно на www.intersurgical.com



| Код | Описание | Кол-во/уп. |
|-----------|---|------------|
| 2255000 | Маска для НИВ FaceFit, малая взрослая | 12 |
| 👁 2256000 | Маска для НИВ FaceFit, средняя взрослая | 12 |
| 2257000 | F Маска для НИВ FaceFit, большая взрослая | 12 |


Сделать запрос

AIRgel - зарегистрированная торговая марка Sleepnet Corporation. Гибкая пластина, Усовершенствованная технология изготовления манжеты, Подвижный коннектор головного крепления являются торговыми марками Sleepnet Corporation.




Двухшланговые дыхательные системы

Дыхательные системы Flextube для пассивного увлажнения

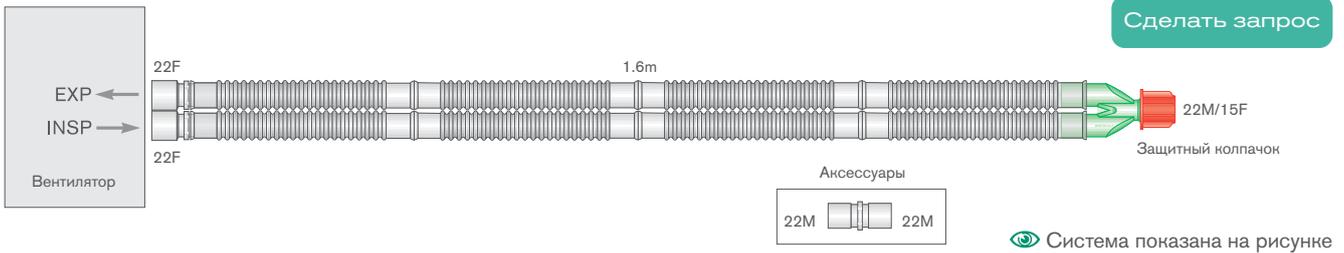


| Код | Описание | Кол-во/ |
|--------------|---|----------|
| 2000000 (S*) | Дыхательный контур Flextube 22мм, длина 1.6м стерильный | 20 (15*) |
| 2006000 | Дыхательный контур Flextube 22мм, длина 2.0м | 15 |

Дыхательные системы Smoothbore для пассивного увлажнения

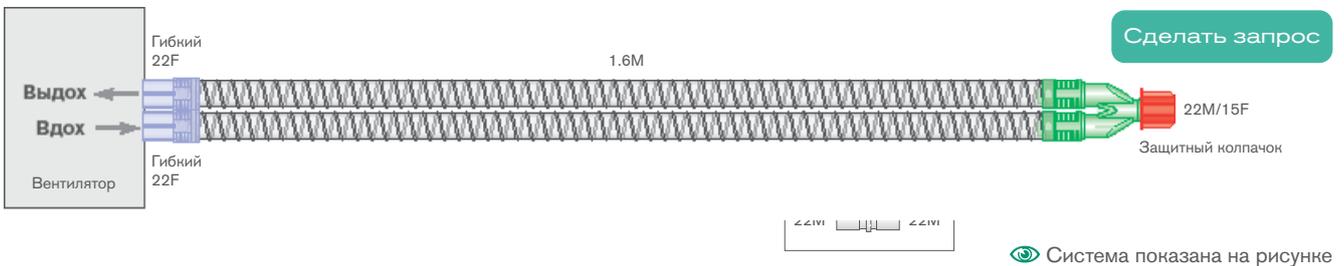

| Код | Описание | Кол-во/уп. |
|--------------|---|------------|
| 5000000 (S*) | Гладкоствольный дыхательный контур 22мм, 1,6м | 12 (20*) |
| 5001000 (S*) | Гладкоствольный дыхательный контур 22мм, 2,0м | 12 (15*) |

Дыхательные контуры Flextube для активного увлажнения

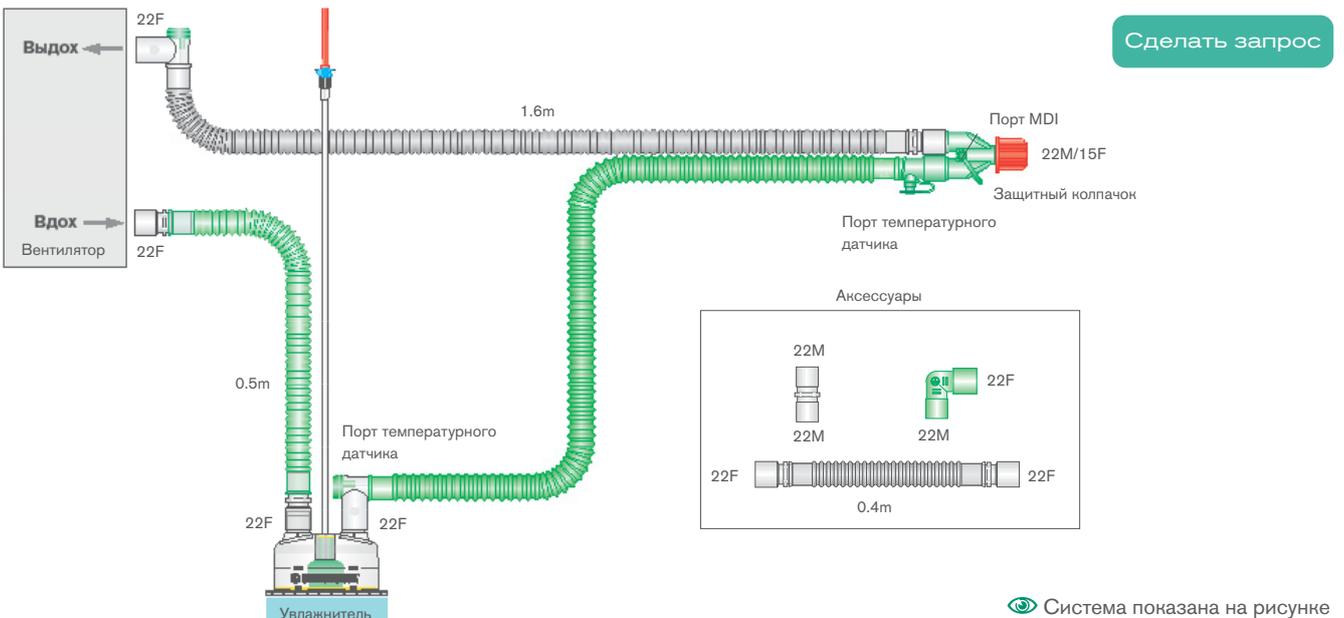

| Код | Описание | Кол-во/ |
|--------------|--|----------|
| 2026000 (S*) | Дыхательный контур Flextube 22мм с двумя проводами нагрева и дополнительным шлангом 0,5м, длина 1,6м | 10 (12*) |
| 2026310 (S*) | Дыхательный контур Flextube 22мм с двумя проводами нагрева, с самозаполняющейся камерой увлажнителя и дополнительным шлангом 0,5м, длина 1,6м - стерильный | 7 (6*) |

С Доступна стерильная опция

(S*) Добавьте "S" к семизначному коду, и вы получите стерильную версию продукта. например 5000000S (в скобках указано кол-во в стерильной упаковке)



Черты и преимущества маски VariFit™ для НИВ

▶ Видео доступно на www.intersurgical.com

AIR^ogel[®] Максимальный комфорт, минимальный вес AIR^ogel[®] минимизирует давление и не вызывает раздражения кожного покрова

Усовершенствованная технология изготовления манжеты™


Эргономичная манжета обеспечивает герметичное прилегание маски

Подвижный коннектор головного крепления™

Двигается вместе с движениями пациента, не нарушая герметичность

Коннектор на 360°

Для оптимального расположения трубки и свободной мобильности

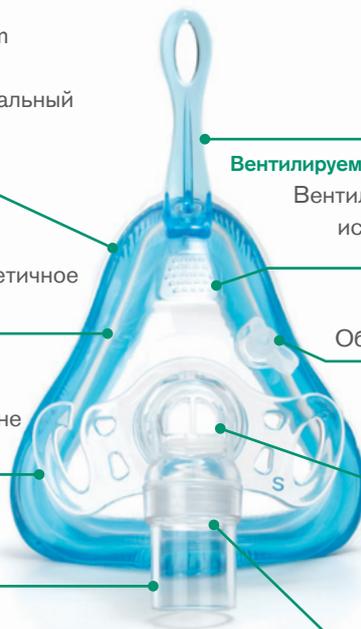

Гибкая пластина™

Уникальный гибкий дизайн обеспечивает превосходную стабильность и герметичность без контакта с кожным покровом

Вентилируемая маска (2260000, 2261000, 2262000 and 2277000)

Вентилируемая маска с клапаном безопасности для использования с устройствами CPAP или bilevel

Кислородный порт

Обеспечивает дополнительную подачу кислорода

Клапан безопасности

Предотвращает повторное вдыхание в случае неадекватной вентиляции

Коннекторы с цветовой индикацией

Позволяют специалисту легко определить правильный размер

Маски VariFit для НИВ произведены Sleepnet Corporation, Hampton, NH, 03842 USA - эксклюзивный дистрибьютор Intersurgical Ltd

Характеристики и преимущества маски FaceFit™ для НИВ

Регулируемый головной держатель


обеспечивает правильную и надежную фиксацию в широком анатомическом диапазоне

Малый вес

Улучшает переносимость пациентом

Легко регулируемый и быстроразъемный ременной держатель

обеспечивает правильную установку и быстрое снятие маски

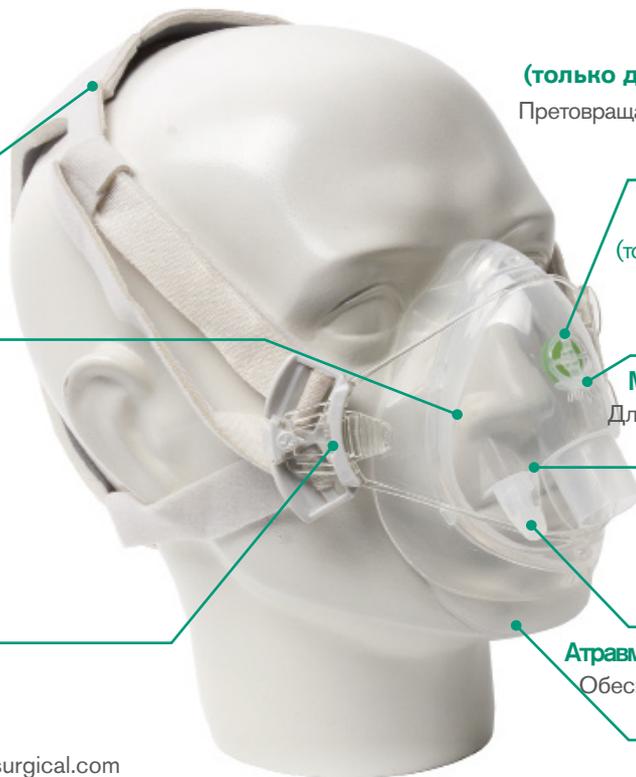

Клапан безопасности (только для масок FaceFit с портом)

Предотвращает повторное вдыхание в случае неадекватной вентиляции

Порт утечки CO₂ (только для масок FaceFit с портом)

Для эффективной вентиляции CPAP или bilevel

Малое мертвое пространство

Для эффективной респираторной поддержки

6мм хвостовик со съёмным колпачком

Для дополнительной подачи кислорода или мониторинга

Атравматичная силиконовая манжета

Обеспечивает правильную установку, оптимальную герметизацию

▶ Видео доступно на www.intersurgical.com



117105, Москва, Дербеневская наб. 11 корпус В, офис 904



Производитель Intersurgical Ltd имеет сертификаты качества ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 и ISO 14001:2004

Пожалуйста, подумайте, прежде чем печатать.

Сохраните энергию и бумагу. Если вам необходимо напечатать этот документ, используйте двустороннюю печать.

IS1.18 • Issue 2 10.17