




## Cirrus™ 2

Терапия с распылением ингаляционных растворов

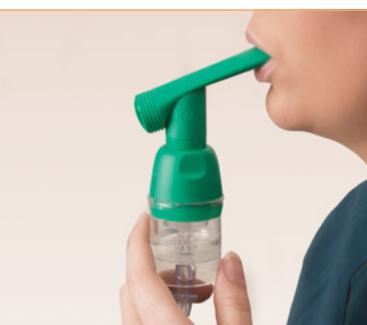

Кислородная и аэрозольная терапия ▪ Терапия с распылением ингаляционных растворов



## Распылитель **Cirrus™2** и комплекты с распылителем


Основанный на базе Cirrus, распылитель Cirrus2 отличается улучшенными характеристиками:

- распылитель работает на малых объемах раствора – значительная экономия;
- на корпусе основания нанесена четкая шкала количества препарата;
- соединение головной части и основания – быстросъемное – четверть оборота – быстрая заправка;
- конструктивно обеспечена более высокая герметизация соединения головной части и основания.

Cirrus2 предназначен для доставки препаратов в трахеобронхиальное дерево. При скорости потока транспортировочного газа 8 л/мин, 74% выходного объема будут составлять частицы диаметром менее 5 микрон со средним массовым диаметром 3,3 микрона.


Распылитель Cirrus 2 может применяться:

- с ороназальными масками Eco и EcoLite™, с мундштуками для индивидуальных ингаляций, в том числе и в домашних условиях;
- в комплекте с Т-образными соединителями – в составе дыхательных систем для взрослых (22 мм), для детей (15 мм), для новорожденных (10 мм).
- в комплекте с 1958000, в состав которого входят направляющий клапан и шланг – обеспечивается возможность отвода газов выдоха.
- в комплекте с 2507002 – для ингаляции при проведении ручной ИВЛ для новорожденных.

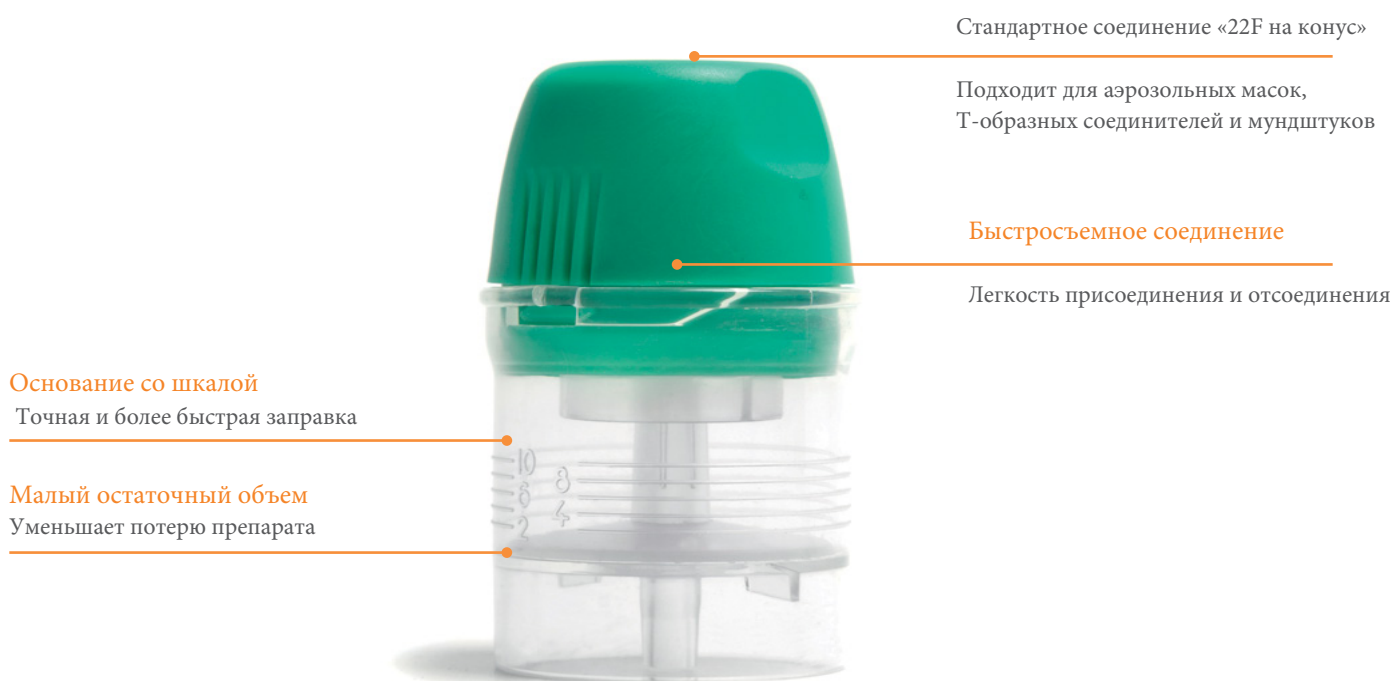

### Самогерметизирующийся Т-образный соединитель

Для исключения разгерметизации контура и активации сигналов тревоги предлагается распылитель Cirrus2 с самогерметизирующимся Т-образным соединителем, встраиваемым в дистальную часть дыхательного контура. При снятии распылителя для заправки лекарственным раствором внутренний клапан соединителя отсекает контур от внешней среды. Клапан открывается при установке распылителя.

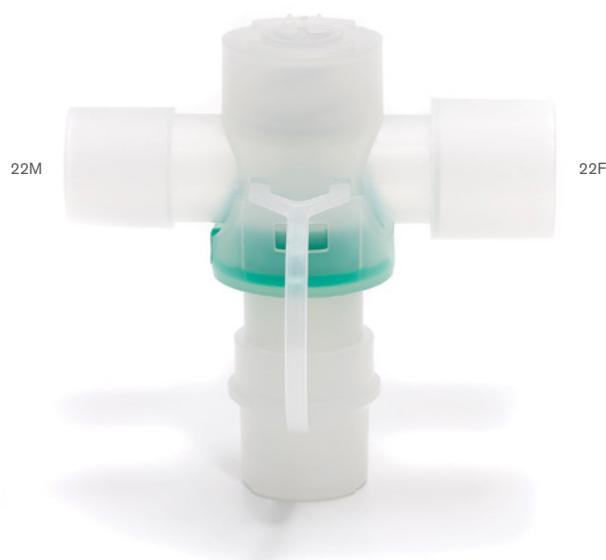

▶ Видео доступно на [www.intersurgical.ru](http://www.intersurgical.ru)





## Комплекты с новыми масками Intersurgical EcoLite™ Маска аэрозольная

Аэрозольная маска Intersurgical EcoLite™ является частью нашей глобальной программы Eco.

Линейка продукции Eco выполнена без ПВХ, что значительно снижает влияние на окружающую среду.

Улучшенный комфорт для пациента – маска легкая и мягкая.

Используя последние передовые технологии, мы совместили 2 материала: из прозрачного и жесткого материала изготовлен анатомический корпус; из мягкого и эластичного – манжета. Корпус маски выполнен по анатомической схеме, с «гребневидной» конструкцией носовой части.



**Гребень - изогнутая форма носовой части маски**

предотвращает попадание струи кислорода в глаза пациента при частичной разгерметизации.

**Нет металлической клипсы**

Совместима с МРТ

**Герметичное прилегание**  
большой комфорт для пациента

Эластомерный держатель - фиксация маски в положении "под ушами" и "над ушами".

Двухступенчатая манжета - герметичное прилегание на лицах любой анатомии

Положение манжеты "на подбородок" и "под подбородок"

Видео доступно на [www.intersurgical.ru](http://www.intersurgical.ru)



### Безопасность для окружающей среды

Цель Intersurgical- минимизировать вредное влияние продуктов на окружающую среду. Использование новых материалов и последних технологий в производстве отразилось в том, что ПВХ был удален из корпуса масок EcoLite.



[www.intersurgical.com/info/eco](http://www.intersurgical.com/info/eco)

### Распылитель Cirrus™2 и комплекты с распылителем

Код	Описание	Длина трубки	Кол-во/уп.
1402000	Распылитель Cirrus2		75
1453015	Распылитель Cirrus2, для взрослых, комплект: маска EcoLite™ и трубка	2.1м	30
1453010	Распылитель Cirrus2, для взрослых, комплект: маска Eco и не содержащая ПВХ трубка	2.1м	30
1454015	Распылитель Cirrus2, для детей, комплект: маска EcoLite™ и трубка	2.1м	36
1455000	Распылитель Cirrus2, комплект: цельнолитой мундштук и трубка	2.1м	35
1464000	Распылитель Cirrus2, комплект: универсальный Т-образный мундштук		40
1464004	Распылитель Cirrus2, комплект: универсальный Т-образный мундштук и фильтр		20
1464021	Распылитель Cirrus2, комплект: мундштук, фильтр и трубка	2.1м	20
2507002	Распылитель Cirrus2, для новорожденных, комплект: дыхательный мешок, гибкие соединители и трубка		18
2605000	Распылитель Cirrus2, Т-образный комплект для дыхательной системы, 22 мм трубка		40
2606000	Распылитель Cirrus2, Т-образный комплект для дыхательной системы, 15 мм трубка		35
2608000	Распылитель Cirrus2, Т-образный комплект для дыхательной системы, 10 мм трубка		45
1958000	Распылитель Cirrus2, комплект: загубник, направляющий клапан, шланг 2,0 м и трубка 1,8м		20

### Самогерметизирующийся Т-образный соединитель

Код	Описание	Кол-во/уп.
2609000	Распылитель Cirrus2 с самогерметизирующимся Т-образным соединителем, 22М-22F-22М 22мм трубка	35
1814000	Самогерметизирующийся Т-образный соединитель 22М-22F, 22М	40

Сделайте запрос

Изделие с минимальным ущербом для окружающей среды



ЗАО "Интерседжикал" 115114 Россия, Москва Дербеневская наб, 11, корп В, офис 904  
+7 (495) 771 68 09 info@intersurgical.ru www.intersurgical.ru



Intersurgical Ltd  
is certified to  
ISO 9001, ISO 13485  
and ISO 14001

Подумайте перед тем, как распечатать.  
Сохраните энергию и бумагу.  
При печати пользуйтесь  
двусторонней печатью.

IS10.23 • Issue 9 06.17